

# Nova™



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

## Aufklappen des Tisches:

- Stellen Sie den Tisch mit den Griffen nach oben hin. Drücken Sie dann auf den Verschlusshebel an der Seite (Abb. 1).
- Ziehen Sie die Tischhälften an den Griffen auseinander (Abb. 2). Achten Sie darauf dass die Kabel sich nicht an den Tischbeinen verfangen.

## Aufstellen des Tisches:

- Stellen Sie den vollständig aufgeklappten Tisch auf die Tischbeine. Heben Sie dann ein Tischende an und drücken Sie auf die Tischmitte so dass die Stahlkabel vollständig gespannt sind. (Abb. 3)

## Verstellen der Tischhöhe:

- Lösen Sie den Schraubknopf für die Höhenverstellung. Nehmen Sie die Beinverlängerung ab. Wählen Sie die gewünschte Tischhöhe. und setzen Sie das Tischbein dann in dieser Höhe auf den Schraubbolzen an der Liege. Schrauben Sie den Schraubknopf wieder handfest auf (Abb. 4).



Abb. 5



Abb. 6

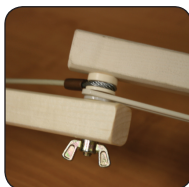


Abb. 8a



Abb. 8b



Abb. 9

## Zusammenklappen der Liege:

- Stellen Sie den Tisch auf die seitlichen GummifüÙe. Versteuen Sie das Zubehör im Inneren des Tisches (Abb. 5). Für das Gestell Ihrer Kopfstütze finden Sie eine Halterung unter dem Tisch.
- Klappen Sie die Tischbeine ein. Überprüfen Sie ob die Armauflage flach anliegt und die Stahlkabel nicht heraushängen. Klappen Sie dann die Tischhälften zusammen, (Abb. 6). Der Verschluss rastet selbsttätig ein.

## Für Tische mit Shiatsu-Kabeln:

- Stellen Sie den Tisch auf die Seite.
- Schrauben Sie die Flügelschraube ab und nehmen Sie Langere Diagonalstrebe, das Kabel und die Unterlegscheiben von der kürzeren Diagonalstrebe ab.
- Schrauben Sie die Teile dann ohne das Stahlkabel wieder zusammen.
- Verfahren Sie genauso mit der zweiten Flügelschraube und dem zweiten Gelenk.
- Drehen Sie den "UniLock" Verschluss zur Seite (Abb.8b)
- Klappen Sie die Tischbeine ganz ein, so dass Sie den Tisch flach auf den Boden legen können (Abb.9)
- Klappen Sie die Tischbeine ganz ein, so dass Sie den Tisch flach auf den Boden legen können (Abb.9)
- ACHTUNG: Bitte beachten Sie unbedingt den Warnhinweis wenn Sie Ihre Liege wieder mit normaler Hoheneinstellung benutzen wollen.

Massagetische & Praxisbedarf GmbH  
**bodynova**

**BODYNOVA GmbH** Massagetische & Praxisbedarf  
OAKWORKS Vertrieb und Service Deutschland  
Vogelsanger Str. 10 · D-50823 Köln · Germany  
Tel. ++49-(0)221-35 66 35-10  
Fax ++49-(0)221-35 66 35-20

[www.bodynova.de](http://www.bodynova.de)



European Compliance for CE Information:  
Emergo Europe  
Molenstraat 15  
The Hague, 2513 BH Netherlands  
[info@emergogroup.com](mailto:info@emergogroup.com)

All portable tables: U.S. Patent 5,009,170  
SlideLock™: U.S. Patent 5,943,965  
Unilock Patent Pending

**OAKWORKS®**, Inc.

923 East Wellspring Rd., New Freedom, PA 17349

Phone: 717-235-6807 FAX: 717-235-6798

[www.oakworks.com](http://www.oakworks.com)



**Achtung**

Zulässiges Arbeitsgewicht:

**200 kg**

**Made in the U.S.A.**

*with US and Imported Parts*

Inspected By: