

Athlet, Advanta, Backrest Athlet, Athlet XXL

Wellspring

Advanta

Alliance Metal

Storable Mat



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Aufklappen des Tisches:

- Stellen Sie den Tisch mit den Griffen nach oben hin. Drücken Sie dann auf den Verschlusshebel an der Seite (Abb. 1).
 - Ziehen Sie die Tischhälften an den Griffen ein Stück auseinander (Abb. 2).
 - Drücken Sie die mittlere Strebe ("Y"-Strebe) gegen die Unterplatte und klappen Sie gleichzeitig die Tischbeine auf. (Abb. 3)
- Klappen Sie die Beine auf der anderen Seite genauso auf. Ziehen Sie an den Griffen bis der Tisch vollständig aufgeklappt ist. Achten Sie darauf dass die Kabel sich nicht an den Tischbeinen verfangen.

Aufstellen des Tisches:

- Stellen Sie den vollständig aufgeklappten Tisch auf die Tischbeine. Heben Sie dann ein Tischende an und drücken Sie auf die Tischmitte so dass die Stahlkabel vollständig gespannt sind. (Abb. 4)

Verstellung des Rückenteils (Modell Backrest Athlet):

- Lösen Sie zunächst die Klettband-Sicherung an der Tischunterseite am Tischende mittig. Ziehen Sie das Rückenteil gleichmäßig nach oben bis zur gewünschten Position. (Abb.5). Vergewissern Sie sich dass die Mechanik auf beiden Seiten in der gleichen Höhe eingerastet ist.



Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9

- Zum Herabsenken müssen Sie das Rückenteil zunächst bis in die höchste Stellung anheben damit die Mechanik auslöst. Fixieren Sie das Rückenteil in der Waagerechten mit dem Klettband.
- Beachten Sie die Warnhinweise bzgl. der Belastung des Rückenteils.

Verstellen der Tischhöhe:

- Die Höhenverstellung sollte bei unbelasteter Liege erfolgen. Drücken Sie den Knopf für die Höhenverstellung ein, drehen Sie die Beinverlängerung ein wenig und ziehen Sie das Bein in die gewünschte Höhe. Drehen Sie jetzt das Bein zurück so dass der Knopf herauspringt (Abb. 6)

Zusammenklappen der Liege:

- Stellen Sie den Tisch auf die seitlichen Gummifüßchen. Verstauen Sie das Zubehör im Inneren des Tisches wie abgebildet (Abb. 7, Advanta Abb. 8).
Hinweis: Der Advanta kann nur mit vollständig eingeschobenen Beinverlängerungen zusammengeklappt werden. Das Kopfstützenpolster passt zwar in die Liege, über längere Zeit sollten Sie es aber separat lagern.
- Klappen Sie die Tischbeine ein und dann die Tischhälften zusammen, (Abb. 9). Der Verschluss rastet selbsttätig ein.

Massagetische & Praxisbedarf GmbH
bodynova

BODYNOVA GmbH Massagetische & Praxisbedarf
OAKWORKS Vertrieb und Service Deutschland
Vogelsanger Str. 10 · D-50823 Köln · Germany
Tel. ++49-(0)221-35 66 35-10
Fax ++49-(0)221-35 66 35-20

www.bodynova.de



European Compliance for CE Information:
Emergo Europe
Molenstraat 15
The Hague, 2513 BH Netherlands
info@emergogroup.com

All portable tables: U.S. Patent 5,009,170
CS System: U.S. Patent 6,192,809
Unilock Patent Pending

Part No. MMINWC0004-DE Revision: A Änderungsdatum: 04/24/2015

ACHTUNG

Zulässiges Arbeitsgewicht:

250 kg

Made in the U.S.A.

with US and Imported Parts

Inspected By:

OAKWORKS®, Inc.

923 East Wellspring Rd., New Freedom, PA 17349

Phone: 717-235-6807 FAX: 717-235-6798

www.oakworks.com


OAKWORKS®
Bodies Talk. We Listen.