

Athlet Sport

The Boss



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Aufklappen des Tisches:

- Stellen Sie den Tisch mit den Griffen nach oben hin. Drücken Sie dann auf den Verschlusshebel an der Seite (Abb. 1).
- Ziehen Sie die Tischhälften an den Griffen ein Stück auseinander (Abb. 2).
- Drücken Sie die mittlere Strebe ("Y"-Strebe) gegen die Unterplatte und klappen Sie gleichzeitig die Tischbeine auf. (Abb. 3) Klappen Sie die Beine auf der anderen Seite genauso auf. Ziehen Sie an den Griffen bis der Tisch vollständig aufgeklappt ist. Achten Sie darauf dass die Kabel sich nicht an den Tischbeinen verfangen.

Aufstellen des Tisches:

- Stellen Sie den vollständig aufgeklappten Tisch auf die Tischbeine. Heben Sie dann ein Tischende an und drücken Sie auf die Tischmitte so dass die Stahlkabel vollständig gespannt sind. (Abb. 4)



Abb. 5

Verstellen der Tischhöhe:

- Die Höhenverstellung sollte bei unbelasteter Liege erfolgen. Drücken Sie den Knopf für die Höhenverstellung ein, drehen Sie die Beinverlängerung ein wenig und ziehen Sie das Bein in die gewünschte Höhe. Drehen Sie jetzt das Bein zurück so dass der Knopf herauspringt (Abb. 5)



Abb. 6

Zusammenklappen der Liege:

- Stellen Sie den Tisch auf die seitlichen Gummifüßchen.
- Verstauen Sie das Zubehör im Inneren des Tisches wie abgebildet (Abb. 6).

Hinweis: Der Athlet Sport kann nur mit vollständig eingeschobenen Beinverlängerungen zusammengeklappt werden. Das Kopfstützenpolster passt zwar in die Liege, bei längerer Lagerung sollten Sie das Polster aber separat lagern.



Abb. 7

- Klappen Sie die Tischbeine ein und dann die Tischhälften zusammen, (Abb. 7). Der Verschluss rastet selbsttätig ein.

Massagetische & Praxisbedarf GmbH
bodynova

BODYNOVA GmbH Massagetische
& Praxisbedarf
OAKWORKS Vertrieb und Service Deutschland
Vogelsanger Str. 10 · D-50823 Köln · Germany
Tel. ++49-(0)221-35 66 35-10
Fax ++49-(0)221-35 66 35-20
www.bodynova.de

ACHTUNG

Zulässiges Arbeitsgewicht:

270 kg

Made in the U.S.A.
with US and imported parts

Inspected By: _____



European Compliance for CE Information:
Emergo Europe
Molenstraat 15
The Hague, 2513 BH Netherlands
info@emergogroup.com

OAKWORKS®, Inc.
923 East Wellspring Rd., New Freedom, PA 17349

Phone: 717-235-6807 FAX: 717-235-6798
www.oakworks.com

OAKWORKS®
Bodies Talk. We Listen.